

LINEA *gluco* Systema

Katalógové číslo: LG 3823

Balenie: 1 x 500 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Systémový roztok Linea *gluco* Systema je určený iba pre glukózové analyzátory, ktoré stanovujú glukózu v predriedenej vzorke na princípe elektrochemického enzymatického stanovenia glukózy.

Použitie

Systémový roztok Linea *gluco* Systema sa používa iba nariadený v pomere 1:9 destilovanou / deionizovanou vodou. Takto nariadený systémový roztok sa naleje do príslušnej nádoby pripojenej ku glukózovému analyzátoru a to podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.

Zloženie

Systémový roztok Linea *gluco* Systema obsahuje ako konzervačné činidlo azid sodný (koncentrácia $\leq 0,15\%$).

Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy

- Pipety
- Destilovaná / deionizovaná voda

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Systémový roztok Linea *gluco* Systema obsahuje azid sodný ako konzervačné činidlo. Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napiť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii systémového roztoku.

Uskladnenie a stabilita

Systémový roztok Linea *gluco* Systema musí byť uskladnený pri teplote 15-25°C. Systémový roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Prípravte systémový roztok Linea *gluco* Systema na použitie nariadením v pomere 1:9 destilovanou / deionizovanou vodou. Takto nariadený systémový roztok sa naleje do príslušnej nádoby pripojenej ku glukózovému analyzátoru a to podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.

Výrobca a distribútor:

*Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk*

Rev. 12/2012