

LINEA *ultima* System Solution Selectra® / Flexor®

Katalógové číslo: LUF 001

Balenie: 1 x 1000 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® je systémovým roztokom pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®.

Použitie

Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® je určený pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®. Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Systémový roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje propanol a alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované.

Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy

- Odmerný valec
- Destilovaná / deionizovaná voda

Uskladnenie a stabilita

Systémový roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® musí byť uskladnený pri teplote 15-25°C na suchom mieste. Systémový roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Balenie Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje 1000 ml koncentrovaného roztoku. Pred samotným použitím sa naplní zásobník analyzátora 25 ml koncentrovaného roztoku Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® a doleje sa do 10 litrov destilovanou vodou (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára.

- Zabráňte kontaminácii systémového roztoku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

H226 – Horľavá kvapalina a pary

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

P233 – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú

P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk

Rev. 05/2020