

LINEA *ultima* System Solution Selectra® / Flexor®

Katalógové číslo: LUF 001

Balenie: 1 x 1000 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® je systémovým roztokom pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®.

Použitie

Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® je určený pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®. Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Systémový roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje propanol a alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované.

Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy

- Odmerný valec
- Destilovaná / deionizovaná voda

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napiť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára.
- Zabráňte kontaminácii systémového roztoku.

Uskladnenie a stabilita

Systémový roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® musí byť uskladnený pri teplote 15-25°C na suchom mieste. Systémový roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Balenie Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje 1000 ml koncentrovaného roztoku. Pred samotným použitím sa naplní zásobník analyzátoru 25 ml koncentrovaného roztoku Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® a doleje sa do 10 litrov destilovanou vodou (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Výstražné symboly:



Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.

Výrobca a distribútor:

Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk

Rev. 06/2013