

LINEA *ultima* Working Solution

Katalógové číslo: LUW 001

Balenie: 2 x 7 l

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Working Solution je pracovným roztokom pre močové analyzátory .

Použitie

Linea *ultima* Working Solution je určený pre močové analyzátory . Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Pracovný roztok Linea *ultima* Working Solution ako konzervačné činidlo obsahuje azid sodný (koncentrácia 0,05%). Tiež obsahuje C12-15-alkylalkoholy etoxylované .

Uskladnenie a stabilita

Pracovný roztok Linea *ultima* Working Solution musí byť uskladnený pri teplote 2-30°C na suchom mieste. Pracovný roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačенý na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Balenie Linea *ultima* Working Solution obsahuje 2 bandasky o objeme 7 l. Pracovný roztok je pripravený na použitie. Bandasku s pracovným roztokom pripojte na patričnú hadičku na analyzátore, na jej koniec predtým pripojte priložený filter (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii pracovného roztoku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

Bezpečnostné upozornenia:

Nevzťahuje sa

Ďalšie výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

Výstražný piktogram:

Nevzťahuje sa

Výstražné slovo:

Nevzťahuje sa

Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk

Rev. 05/2020