

LINEA *ultima* Cleaner

Katalógové číslo: LUW 002

Balenie: 1 x 500 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Cleaner je čistiacim roztokom pre močové analyzátory .

Použitie

Linea *ultima* Cleaner je čistiacim roztokom pre močové analyzátory . Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Čistiaci roztok Linea *ultima* Cleaner obsahuje chlórnan sodný (menej ako 5% aktívneho chlóru).

Uskladnenie a stabilita

Čistiaci roztok Linea *ultima* Cleaner musí byť uskladnený pri teplote 2-8°C na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach. Po otvorení je doba expirácie 1 mesiac pri skladovaní v uzavretej fľaši a pri teplote 2-8°C.

Príprava

Balenie Linea *ultima* Cleaner obsahuje 500 ml čistiaceho roztoku pripraveného na použitie. Odlejte z fľašky Linea *ultima* Cleaner roztok do skúmavky a túto vložte do stojana označeného „Control/focus“ na pozíciu označenú C. Stojan vložte do močového analyzátora (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii čistiaceho roztoku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy

H290 – Môže byť korozívny pre kovy

Bezpečnostné upozornenia:

P260 – Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly

P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre

P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára

P403+P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P406 – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii, nádobe s odolnou vnútornou vrstvou

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi

Ďalšie výstražné upozornenia:

EUH031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

EUH206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk

Rev. 05/2020