

LINEA *ultima* Diluent

Katalógové číslo: LUW 003

Balenie: 1 x 500 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Diluent je premývacím a riediacim roztokom pre močové analyzátory .

Použitie

Linea *ultima* Diluent je premývacím roztokom pre močové analyzátory a riediacim roztokom pre moče s veľkým počtom elementov. Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Premývací a riediaci roztok Linea *ultima* Diluent obsahuje ako konzervačné činidlo 2-phenoxyetanol (menej ako 1%).

Uskladnenie a stabilita

Premývací a riediaci roztok Linea *ultima* Diluent musí byť uskladnený pri teplote 2-30°C na suchom mieste. Roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Balenie Linea *ultima* Diluent obsahuje 500 ml premývacieho a riediaceho roztoku pripraveného na použitie. Odlejte z fľašky Linea *ultima* Diluent roztok do 2 skúmaviek a tieto vložte do stojana označeného „Control/focus“ na pozície označené D. Stojan vložte do močového analyzátora (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Použitie na riedenie močov: Na základe výsledku analýzy močového sedimentu zvolte patričné riedenie a vzorku moča nariďte vo Vami zvolenom pomere s Linea *Ultima* Diluent (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napit' veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii premývacieho a riediaceho roztoku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

Bezpečnostné upozornenia:

Nevzťahuje sa

Ďalšie výstražné upozornenia:

EUH210 – Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

Výstražný piktogram:

Nevzťahuje sa

Výstražné slovo:

Nevzťahuje sa

Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 05/2020