

## LINEA *ultima* QC / Focusing Kit

**Katalógové číslo:** LUW 004

**Balenie:** 1 x 125 ml Linea *ultima* QC Positive  
1 x 125 ml Linea *ultima* QC Negative  
2 x 125 ml Linea *ultima* Focusing Solution  
40 ks barkódov pre Linea *ultima* QC Positive  
40 ks barkódov pre Linea *ultima* QC Negative  
50 ks barkódov pre Linea *ultima* Focusing Solution

**Pre in vitro diagnostické použitie.**

**Iba pre profesionálne použitie.**



### Určenie

Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* QC Negative sú kontrolnými roztokmi pre močové analyzátory IRIS iQ™200. Linea *ultima* Focusing Solution je roztok pre nastavenie optiky močového analyzátora IRIS iQ™200.

Diagnostická súprava Linea *ultima* QC / Focusing Kit je funkčným ekvivalentom výrobkov distribuovaných originálnym výrobcom (OEM – skratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

### Použitie

Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* QC Negative sú kontrolnými roztokmi pre močové analyzátory IRIS iQ™200. Linea *ultima* Focusing Solution je roztok pre nastavenie optiky močového analyzátora IRIS iQ™200. Roztoky sú určené iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Diagnostická súprava Linea *ultima* QC / Focusing Kit je funkčným ekvivalentom OEM. Svojimi parametrami, funkčnosťou a kvalitou plne nahrádza potrebu použitia originálneho výrobku distribuovaného originálnym výrobcom.

### Zloženie

Linea *ultima* QC Positive, Linea *ultima* QC Negative a Linea *ultima* Focusing Solution obsahujú NaCl a ako konzervačné činidlo azid sodný. Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* Focusing Solution obsahujú aj stabilizované erytrocyty.

### Uskladnenie a stabilita

Roztoky súpravy Linea *ultima* QC / Focusing Kit musia byť uskladnené pri teplote 2-8°C na suchom a tmavom mieste dobre uzavreté. Roztoky sú stabilné do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na etikete, pokiaľ sú uskladnené pri uvedených podmienkach. Po prvom otvorení sú roztoky stabilné 30 dní, pokiaľ sú uskladnené pri uvedených podmienkach.

### Návod na použitie

- Linea *Ultima* QC Positive je pripravený na použitie. Pred použitím obsah fľašky dôkladne premiešajte.  
Linea *Ultima* QC Negative je pripravený na použitie.  
Linea *Ultima* QC Focusing Solution je pripravený na použitie. Pred použitím obsah fľašky dôkladne premiešajte.

- Odlejte kontrolný roztok z fľašky Linea *Ultima* QC Positive do 1 skúmavky, nalepte na ňu barkód pre Linea *Ultima* QC Positive priložený v balení a túto skúmavku vložte na miesto označené „Control+“ v stojane označenom „Control/focus“. Stojan vložte do močového analyzátora IRIS iQ™200 (viď Operačný manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).
- Odlejte kontrolný roztok z fľašky Linea *Ultima* QC Negative do 1 skúmavky, nalepte na ňu barkód pre Linea *Ultima* QC Negative priložený v balení a túto skúmavku vložte na miesto označené „Control-“ v stojane označenom „Control/focus“. Stojan vložte do močového analyzátora IRIS iQ™200 (viď Operačný manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).
- Odlejte roztok pre nastavenie optiky z fľašky Linea *Ultima* Focusing Solution do 1 skúmavky, nalepte na ňu barkód pre Linea *Ultima* Focusing Solution priložený v balení a túto skúmavku vložte na miesto označené „Focus“ v stojane označenom „Control/focus“. Stojan vložte do močového analyzátora IRIS iQ™200 (viď Operačný manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

## Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii roztokov.

## Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Bezpečnostné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Ďalšie výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Výstražný piktogram:

Nevzťahuje sa

### Výstražné slovo:

Nevzťahuje sa

## Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Názvy rôznych výrobcov, ich prístrojov a produktov tu uvedených môžu byť chránené ochrannou známkou alebo iným spôsobom a sú tu použité len na účely referencie. Nie je zasiahnuté do žiadnych ochranných znáмок či iných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovne odmieta akúkoľvek spojitosť s nimi.

*Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk), alebo na požiadanie u distribútora.*



*Eurolab Lambda a.s.  
T.Milkina 2, Trnava  
Tel.: +421 33 5341 448  
Fax: +421 33 5443 094  
[www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)*

*Rev. 05/2020*