

## LINEA *ultima* Standard Kit

**Katalógové číslo:** LUW 005

**Balenie:** 4 x 125 ml Linea *ultima* Standard Solution  
50 ks barkódov pre Linea *ultima* Standard Solution  
alebo  
1 x 125 ml Linea *ultima* Standard Solution  
15 ks barkódov pre Linea *ultima* Standard Solution

**Pre in vitro diagnostické použitie.**

**Iba pre profesionálne použitie.**



### Určenie

Linea *ultima* Standard Solution je kalibračným roztokom pre močové analyzátory IRIS iQ™200.

Diagnostická súprava Linea *ultima* Standard Kit je funkčným ekvivalentom výrobkov distribuovaných originálnym výrobcom (OEM – skratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

### Použitie

Linea *ultima* Standard Solution je kalibračným roztokom pre močové analyzátory IRIS iQ™200. Roztok je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Diagnostická súprava Linea *ultima* Standard Kit je funkčným ekvivalentom OEM. Svojimi parametrami, funkčnosťou a kvalitou plne nahrádza potrebu použitia originálneho výrobku distribuovaného originálnym výrobcom.

### Zloženie

Linea *ultima* Standard Solution obsahuje NaCl, stabilizované erytrocyty a ako konzervačné činidlo azid sodný.

### Uskladnenie a stabilita

Roztoky súpravy Linea *ultima* Standard Kit musia byť uskladnené pri teplote 2-8°C na suchom a tmavom mieste dobre uzavreté. Roztoky sú stabilné do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na etikete, pokiaľ sú uskladnené pri uvedených podmienkach. Po prvom otvorení sú roztoky stabilné 7 dní, pokiaľ sú uskladnené pri uvedených podmienkach.

### Návod na použitie

- Linea *Ultima* Standard Solution je pripravený na použitie. Pred použitím obsah fľašky dôkladne premiešajte.
- Odlejte štandardný roztok z fľašky Linea *Ultima* Standard Solution do 10 skúmaviek, nalepte na ne barkódy priložené v balení a tieto skúmavky vložte na 10 miest v stojane určenom na kalibráciu. Stojan vložte do močového analyzátora IRIS iQ™200

a spustíte kalibráciu analyzátoru IRIS iQ™200 (viď Operačný manuál k analyzátoru IRIS iQ™200 ).

## Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii roztokov.

## Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Bezpečnostné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Ďalšie výstražné upozornenia:

Nevzťahuje sa

### Výstražný piktogram:

Nevzťahuje sa

### Výstražné slovo:

Nevzťahuje sa

## Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Názvy rôznych výrobcov, ich prístrojov a produktov tu uvedených môžu byť chránené ochrannou známkou alebo iným spôsobom a sú tu použité len na účely referencie. Nie je zasiahnuté do žiadnych ochranných známkov či iných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovne odmieta akúkoľvek spojitosť s nimi.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk), alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

[www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)

Rev. 05/2020