



**EUROLAB  
LAMBDA**

## **LINEA *gluco* Systema**

**Katalógové číslo: LG 3823**

**Balenie: 1 x 500 ml**

**Pre in vitro diagnostické použitie.**

**Iba pre profesionálne použitie.**

### **Určenie**

Systémový roztok Linea *gluco* Systema je určený iba pre glukózové analyzátory, ktoré stanovujú glukózu v predriedenej vzorke na princípe elektrochemického enzymatického stanovenia glukózy.

### **Použitie**

Systémový roztok Linea *gluco* Systema sa používa iba nariadený v pomere 1:9 destilovanou / deionizovanou vodou. Takto nariadený systémový roztok sa naleje do príslušnej nádoby pripojenej ku glukózovému analyzátoru a to podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.

### **Zloženie**

Systémový roztok Linea *gluco* Systema obsahuje ako konzervačné činidlo azid sodný (koncentrácia  $\leq 0,15\%$ ).

### **Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy**

- Pipety
- Destilovaná / deionizovaná voda

### **Uskladnenie a stabilita**

Systémový roztok Linea *gluco* Systema musí byť uskladnený pri teplote 15-25°C. Systémový roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

### **Príprava**

Pripravte systémový roztok Linea *gluco* Systema na použitie nariadením v pomere 1:9 destilovanou / deionizovanou vodou. Takto nariadený systémový roztok sa naleje do príslušnej nádoby pripojenej ku glukózovému analyzátoru a to podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.

### **Upozornenia a bezpečnostné opatrenia**

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.

- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Systémový roztok Linea *gluco* Systema obsahuje azid sodný ako konzervačné činidlo. Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii systémového roztoku.

## Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia:

H302 – Škodlivý po požití

### Bezpečnostné upozornenia:

P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite

P301+P312 – PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára

### Výstražný piktogram:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

## Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk), alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.  
T.Milkina 2, Trnava  
Tel.: +421 33 5341 448  
Fax: +421 33 5443 094  
[www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)

Rev. 05/2020