

LINEA *ultima* Universal

Katalógové číslo: LUU 001

Balenie: 1 x 1000 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Universal je univerzálnym čistiacim pracovným roztokom. Roztok je určený na čistenie povrchov od organických nečistôt. Vhodný je na povrchy z bežnej ocele, nerez, skla, emailu, gummy a umelých hmôt odolných voči alkáliám. Nevhodný na povrchy z hliníka a jeho zliatin.

Použitie

Linea *ultima* Universal slúži ako univerzálny koncentrovaný čistiaci roztok na manuálne čistenie

Zloženie

Koncentrovaný čistiaci roztok Linea *ultima* Universal obsahuje hydroxid sodný, polykremičitan sodný, fosforečnan sodný a sodnú soľ kyseliny nitrilotrioctovej.

Uskladnenie a stabilita

Pracovný roztok Linea *ultima* Universal musí byť uskladnený pri teplote 5-25°C na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava a použitie

Predmety určené na čistenie sa ponoria do pripraveného roztoku (20 ml / liter vody) na niekoľko hodín. Doba kontaktu závisí od stupňa znečistenia. Pre zvýšenie čistiaceho účinku je možné roztok zahriať na teplotu 60°C. Po umytí sa predmety opláchnu čistou vodou, resp. podľa potreby aj destilovanou vodou.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s očami preplachujte otvorené oči 10 – 15 minút. Pri vyplachovaní odstráňte kontaktné šošovky. Vyhľadajte lekára.
- Zabráňte kontaminácii roztoku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

Bezpečnostné upozornenia:

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

P260 – Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte pokožku

P281 – Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky

P308+P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť

P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk

Rev. 05/2020