

LINEA *ultima* Universal

Katalógové číslo: LUU 001

Balenie: 1 x 1000 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Universal je univerzálnym čistiacim pracovným roztokom. Roztok je určený na čistenie povrchov od organických nečistôt. Vhodný je na povrchy z bežnej ocele, nerez, skla, emailu, gumy a umelých hmôt odolných voči alkáliám. Nevhodný na povrchy z hliníka a jeho zliatin.

Použitie

Linea *ultima* Universal slúži ako univerzálny koncentrovaný čistiaci roztok na manuálne čistenie

Zloženie

Koncentrovaný čistiaci roztok Linea *ultima* Universal obsahuje hydroxid sodný, polykremičitan sodný, fosforečnan sodný a sodnú soľ kyseliny nitrilotrioctovej.

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s očami preplachujte otvorené oči 10 – 15 minút. Pri vyplachovaní odstráňte kontaktné šošovky. Vyhľadajte lekára.
- Zabráňte kontaminácii roztoku.
- Používajte osobné ochranné pomôcky.

Uskladnenie a stabilita

Pracovný roztok Linea *ultima* Universal musí byť uskladnený pri teplote 5-25°C na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava a použitie

Predmety určené na čistenie sa ponoria do pripraveného roztoku (20 ml / liter vody) na niekoľko hodín. Doba kontaktu závisí od stupňa znečistenia. Pre zvýšenie čistiaceho účinku je

možné roztok zahriať na teplotu 60°C. Po umytí sa predmety opláchnu čistou vodou, resp. podľa potreby aj destilovanou vodou.

Výstražné symboly:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.

Výrobca a distribútor:

*Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk*

Rev. 07/2013